



INSTRUÇÃO DE USO
KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS

Página 1 de 10

Nome Técnico	KIT INSTRUMENTAL
Nome Comercial	KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS
Código/Descrição	Conforme item 4.1 Quadro 1.
Notificação ANVISA	80084420001
Responsável Técnico	Eng. Dr. Tóride S. Celegatti Filho – CREA 5061019918
Revisão:	00

Fabricado e Distribuído por:

Tóride Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Caetano Schincariol 97
Parque das Empresas – Mogi Mirim-SP
CEP 13803-340
CNPJ 54.673.199/0001-48

Fone: 55 (19) 3805-7580

E-mail: sac@torideimplantes.com.br
vendas@torideimplantes.com.br



Atenção: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nestas instruções. A não observação destes pontos poderá levar a ocorrência de complicações.

PRODUTO DE USO MÉDICO

PRODUTO NÃO ESTÉRIL. ESTERILIZAR ANTES DO USO

DEVE SER USADO APENAS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO

Prezado Cliente, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4 de 15 de junho de 2012, estaremos disponibilizando esta Instrução de Uso somente pelo nosso site, pelo endereço eletrônico www.toride.com.br/iu/80084420001.pdf. Caso necessite na forma impressa, solicite pelo sac@torideimplantes.com.br ou pelo telefone **08007722258**, que será enviada, **sem custo adicional inclusive de envio**.



1. Indicação / Finalidade

O Instrumental existente no Kit de Instrumental Cirúrgico para Mini e Micro Fragmentos tem a finalidade de auxiliar o profissional na fixação de Implantes em cirurgias de face, mão, pé e crânio.

2. Tecnologia

Todos os produtos possuem a mesma tecnologia de funcionamento e contam com a mesma base de projeto e construção.

3. Nome do Produto

Kit de Instrumental Cirúrgico para Mini e Micro Fragmentos

4. Descrição Detalhada do Produto Médico, incluindo, os Fundamentos de Seu Funcionamento e Sua Ação, Seu Conteúdo ou Composição, Quando Aplicável, Assim Como Relação dos Acessórios Destinados a Integrar o Produto.

4.1 Composição do Produto

Todos os componentes do **Kit de Instrumental Cirúrgico para Mini e Micro Fragmentos** são produzidos em aço inox de alta resistência.

Alguns instrumentais (chave 1.2 mm – 1.5 mm – 2.0 mm – 2.4 mm e conjunto retrator) possuem empunhadura produzida em alumínio e o restante produzido em aço inox. Foi utilizado este material pelas suas características anti-eskorregadias, pois evitam que eskorreguem/deslizem nas mãos do profissional habilitado ao serem manuseadas durante a cirurgia.

A lista dos instrumentais que compõem o **Kit de Instrumental Cirúrgico para Mini e Micro Fragmentos**, o código de referência do produto e a numeração do respectivo desenho, pode ser visualizado no Quadro 1.

Quadro 1.

Instrumental	Código	Descrição
Broca Mini e Micro Linha 2.4	1.44.05.19.24.008	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 65 x 8.0
	1.44.05.19.24.010	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 65 x 10.0
	1.44.05.19.24.014	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 65 x 14.0
	1.44.05.19.24.065	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 65 x 24.0
	1.44.05.19.24.092	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 100 x 8.0

Broca Mini e Micro Linha 2.4	1.44.05.19.24.090	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 100 x 10.0
	1.44.05.19.24.086	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 100 x 14.0
	1.44.05.19.24.100	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 100 x 24.0
	1.44.05.19.24.107	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 115 x 8.0
	1.44.05.19.24.105	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 115 x 10.0
	1.44.05.19.24.101	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 115 x 14.0
	1.44.05.19.24.091	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 115 x 24.0
	1.44.05.19.24.147	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 155 x 8.0
	1.44.05.19.24.145	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 155 x 10.0
	1.44.05.19.24.141	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 155 x 14.0
	1.44.05.19.24.131	Broca Mini e Micro Ø 1.9 Linha 2.4 – 155 x 24.0
Broca Mini e Micro Linha 2.0	1.44.05.16.20.004	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 4.0
	1.44.05.16.20.005	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 5.0
	1.44.05.16.20.006	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 6.0
	1.44.05.16.20.008	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 8.0
	1.44.05.16.20.010	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 10.0
Broca Mini e Micro Linha 2.0	1.44.05.16.20.012	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 12.0
	1.44.05.16.20.014	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 14.0
	1.44.05.16.20.016	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 16.0
	1.44.05.16.20.018	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 18.0
	1.44.05.16.20.065	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 24.0
Broca Mini e Micro Linha 2.0	1.44.05.16.20.096	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 4.0
	1.44.05.16.20.095	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 5.0
	1.44.05.16.20.094	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 6.0
	1.44.05.16.20.092	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 8.0
	1.44.05.16.20.090	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 10.0
Broca Mini e Micro Linha 2.0	1.44.05.16.20.088	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 12.0
	1.44.05.16.20.086	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 14.0
	1.44.05.16.20.084	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 16.0
	1.44.05.16.20.082	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 18.0
	1.44.05.16.20.076	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 100 x 24.0
	1.44.05.16.20.111	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 4.0



INSTRUÇÃO DE USO
KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS

Página 4 de 10

Broca Mini e Micro Linha 2.0	1.44.05.16.20.110	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 5.0
	1.44.05.16.20.109	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 6.0
	1.44.05.16.20.107	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 8.0
	1.44.05.16.20.105	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 10.0
	1.44.05.16.20.103	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 12.0
Broca Mini e Micro Linha 2.0	1.44.05.16.20.101	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 14.0
	1.44.05.16.20.099	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 16.0
	1.44.05.16.20.097	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 18.0
	1.44.05.16.20.091	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 115 x 24.0
	1.44.05.16.20.015	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 30 x 15.0
	1.44.05.16.20.024	Broca Mini e Micro Ø 1.6 Linha 2.0 – 65 x 24.0 S/ Stop
Broca Mini e Micro Linha 1.5	1.44.05.11.15.023	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65 x 23.0
	1.44.05.11.15.065	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65 x 17.0
	1.44.05.11.15.030	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65 x 15.0
	1.44.05.11.15.030	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 30 x 15.0
Broca Mini e Micro Linha 1.5 Ponta Curta	1.44.05.11.15.004	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65.0 x 4.0
	1.44.05.11.15.005	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65.0 x 5.0
	1.44.05.11.15.007	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65.0 x 7.0
	1.44.05.11.15.009	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65.0 x 9.0
	1.44.05.11.15.011	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65.0 x 11.0
	1.44.05.11.15.013	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65.0 x 13.0
	1.44.05.11.15.015	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 65.0 x 15.0
Broca Mini e Micro Linha 1.5 Ponta Curta	1.44.05.11.15.111	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 115.0 x 4.0
	1.44.05.11.15.110	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 115.0 x 5.0
	1.44.05.11.15.108	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 115.0 x 7.0
	1.44.05.11.15.107	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 115.0 x 9.0
	1.44.05.11.15.100	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 115.0 x 11.0
	1.44.05.11.15.104	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 115.0 x 13.0
	1.44.05.11.15.102	Broca Mini e Micro Ø 1.1 Linha 1.5 – 115.0 x 15.0
Broca Mini e Micro Linha 1.2 Ponta Curta	1.44.05.09.12.004	Broca Mini e Micro Ø 0.9 Linha 1.2 – 65.0 x 4.0
	1.44.05.09.12.005	Broca Mini e Micro Ø 0.9 Linha 1.2 – 65.0 x 5.0
	1.44.05.09.12.007	Broca Mini e Micro Ø 0.9 Linha 1.2 – 65.0 x 7.0



INSTRUÇÃO DE USO
KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS

Página 5 de 10

Broca Mini e Micro Linha 1.2 Ponta Curta	1.44.05.09.12.009	Broca Mini e Micro Ø 0.9 Linha 1.2 – 65.0 x 9.0
	1.44.05.09.12.015	Broca Mini e Micro Ø 0.9 Linha 1.2 – 65.0 x 15.0
	1.44.05.08.12.015	Broca Mini e Micro Ø 0.9 Linha 1.2 – 65 x 15.0 S/ Stop
Cabo de Chave	1.03.07.25.12.100	Cabo de Chave Com Engate Rápido 1.2
	1.03.07.25.15.100	Cabo de Chave Com Engate Rápido 1.5
	1.03.07.25.20.100	Cabo de Chave Com Engate Rápido 2.0
	1.00.99.25.24.105	Cabo de Chave Com Engate Rápido 2.4
	1.00.07.18.15.100	Cabo de Chave Com Engate Rápido 1.5 EX
Alicate	1.00.03.00.30.150	Alicate de Pega 1.5 / 2.0
	1.30.03.00.15.172	Alicate Modelador
	1.00.04.00.24.202	Alicate de Roldana Dobrar Placas 2.4
	1.30.01.00.15.160	Alicate de Dobra 1.5
	1.30.01.00.20.160	Alicate de Dobra 2.0
	1.00.02.00.30.145	Alicate de Corte 1.5 / 2.0
Macho	1.42.05.30.15.095	Macho Graduado Ø 1.5 mm
	1.42.05.30.20.095	Macho Graduado Ø 2.0mm
	1.42.05.30.24.095	Macho Graduado Ø 2.4mm
Pinça	1.42.30.05.47.165	Pinça Para Placas 1.5 / 2.0
	1.20.09.10.78.162	Pinça de Redução
	1.30.07.10.85.160	Pinça Universal
	1.42.05.30.07.154	Pinça de Redução SM
	1.42.05.30.07.141	Pinça Com Garra
	1.20.10.10.78.162	Pinça de Redução Ponta Reta
	1.42.30.05.06.165	Pinça Para Placas KN
	1.00.09.00.07.208	Pinça de Redução Grande
	1.42.30.05.30.165	Pinça Para Placas 1.2 mm com Ponta Esférica
Punção	1.30.05.18.00.066	Punção Sistema 2.0
	1.30.05.18.24.066	Punção Sistema 2.4
Chave	1.42.05.07.00.241	Chave Para Bloqueador Sextavada 3.5 mm
Ponta de Chave	1.42.22.29.24.095	Ponta de Chave Quadrada P/ Parafuso 2.4 mm
	1.42.22.29.27.095	Ponta de Chave Quadrada P/ Parafuso 2.7 mm
	1.42.06.29.12.094	Ponta de Chave Fenda Cruz P/ Parafuso 1.2 mm



INSTRUÇÃO DE USO
KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS

Página 6 de 10

Ponta de Chave	1.42.06.29.15.094	Ponta de Chave Fenda Cruz P/ Parafuso 1.5 mm
	1.42.06.29.20.094	Ponta de Chave Fenda Cruz 2.0 mm
	1.42.06.29.24.088	Ponta de Chave Fenda Cruz 2.4 mm
	1.42.22.29.15.094	Ponta de Chave Quadrada P/ Parafuso 1.5 – 1.7
	1.42.22.29.20.094	Ponta de Chave Quadrada P/ Parafuso 2.0 – 2.3
	1.42.06.30.15.025	Ponta de Chave Fenda Cruz 1.5 x 30 mm EX
	1.42.22.30.15.025	Ponta de Chave Quadrada 1.5 x 30 mm EX
Afastador	1.42.05.00.16.165	Afastador
Tesoura	1.30.10.00.15.130	Tesoura KN
Guia	1.00.99.24.29.135	Conjunto Guia de Broca 2.4
	1.00.05.13.20.025	Conjunto Guia de Broca Com Furo Excêntrico SM
	1.00.05.13.12.024	Conjunto Guia de Broca 1.2 mm SM
	1.00.05.13.15.024	Conjunto Guia de Broca 1.5 mm SM
	1.00.05.13.20.024	Conjunto Guia de Broca 2.0 mm SM
	1.30.98.00.15.126	Subconjunto Guia de Broca
	1.00.00.40.35.106	Conjunto Guia de Broca Angular
	1.00.00.40.08.033	Conjunto Guia de Broca Ø 2.0 mm
	1.00.00.40.08.035	Conjunto Guia de Broca Ø 1.7 mm
Fio Guia	1.38.05.00.15.150	Fio Guia
Retrator	1.30.99.30.25.087	Retrator
	1.00.99.30.25.148	Conjunto Cabo do Retrator 1.5 / 2.0
	1.00.99.24.25.148	Conjunto Cabo do Retrator 2.4
	1.00.99.30.00.000	Conjunto Montado Retrator Sistema 1.5 / 2.0
	1.00.99.24.00000	Conjunto Montado Retrator Sistema 2.4
Cânula	1.30.05.18.00.055	Cânula Redutora Sistema 2.0
	1.30.05.18.24.055	Cânula Redutora Sistema 2.4
	1.30.05.00.17.555	Cânula Guia de Broca
	1.30.05.00.24.055	Cânula Guia de Broca 2.4
Medidor de Cortical	1.30.99.88.15.177	Medidor de Cortical Sistema 1.5
	1.30.99.88.20.216	Medidor de Cortical Sistema 2.0
	1.30.99.88.24.216	Medidor de Cortical sistema 2.4



INSTRUÇÃO DE USO
KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS

Página 7 de 10

Caixas	1.11.30.12.90.290	Caixa de Alumínio para Mini e Micro 1.5 / 2.0
	1.11.30.24.90.290	Caixa de Alumínio para Mini e Micro 2.4
	1.00.11.52.35.335	Conj. Caixa de Plástico Mini e Micro Frag. 1.5 / 2.0
	1.00.12.42.35.335	Conj. Caixa de Plástico Mini e Micro Frag. 2.4 / 2.7
	1.00.11.02.35.255	Conj. Caixa de Plástico Mini e Micro Frag. Peq.
Disposição	1.00.30.12.72.295	Disposição de Instrumentais 1.5 / 2.0
	1.00.30.24.72.295	Disposição de Instrumentais 2.4
	1.00.05.01.15.235	Disposição de Instrumentais KN 1.5
	1.00.00.56.30.306	Disposição de Instrumentais 1.5 / 2.0 EXP
	1.00.00.56.24.306	Disposição de Instrumentais 2.4 EXP
	1.00.00.10.29.312	Disposição de Instrumentais 2.0 SM
Estojo	1.00.07.23.15.235	Conjunto Estojo para Mini e Micro 1.5
	1.00.07.23.20.235	Conjunto Estojo para Mini e Micro 2.0
	1.00.07.23.24.235	Conjunto Estojo para Mini e Micro 2.4
	1.14.00.15.93.140	Conjunto Estojo para Mini e Micro EX 1.5
	1.00.00.25.15.173	Conjunto Estojo para Mini e Micro KN 1.5
	1.00.00.23.15.215	Conjunto Estojo para Mini e Micro 1.5 EXP
	1.00.00.23.20.215	Conjunto Estojo para Mini e Micro 2.0 EXP
	1.00.00.25.24.235	Conjunto Estojo para Mini e Micro 2.4 EXP
	1.00.00.23.12.216	Conjunto Estojo para Mini e Micro SM 1.2
	1.00.00.23.15.216	Conjunto Estojo para Mini e Micro SM 1.5
	1.00.00.23.20.216	Conjunto Estojo para Mini e Micro SM 2.0

5. Indicação, Finalidade ou Uso a Que se Destina o Produto Médico. Segundo Indicado Pelo Fabricante:

Os Instrumentais existentes no Kit Instrumental têm a finalidade de auxiliar o profissional na fixação de Implantes em Cirurgias Buco-Maxilo-Faciais Mão, Punho e Pé.

6. Precauções, Restrições, Advertências, Cuidados Especiais e Esclarecimentos Sobre o Uso do Produto Médico, Assim Como seu Armazenamento e Transporte.



PRECAUÇÕES

- a) Esse produto deve ser esterilizado em autoclave antes de sua utilização;
- b) Esse produto não deve ser utilizado por pessoal desqualificado;
- c) Nunca utilizar uma autoclave que não expurgue todo o ar, pois além de não se obter a esterilização ocorre excesso de temperatura e oxidação;
- d) Submeter o Instrumental a um processo de secagem ao final da autoclavagem, sempre que este for armazenado para uso posterior;
- e) Restos de detergentes e alvejantes nos panos que envolve os pacotes para esterilização podem provocar oxidação e manchas no Instrumental;
- f) Instrumental que contenha articulações e cremalheira deve ser mantido aberto durante o procedimento de esterilização, pois tensões metálicas podem surgir devido a estas articulações fechadas e/ou as cremalheiras presas;
- g) Os procedimentos de limpeza devem ser realizados utilizando-se de EPI's (Equipamento de Proteção Individual): óculos, máscara, gorro, botas, avental impermeável de mangas longas e luvas de borracha.

7. CONSERVAÇÃO

- a) Manter esse produto em local adequado, limpo, sem umidade e em sua embalagem original até o momento de sua utilização;
- b) Respeitar as condições de Limpeza e Esterilização;
- c) Submeter este material apenas em técnicas cirúrgicas consagradas e por profissionais qualificados.

8. ARMAZENAMENTO

Os Instrumentais Cirúrgicos devem ser armazenados limpos, descontaminados e completamente secos em local limpo, seco e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento, mantendo sua integridade física.

9. TRANSPORTE

Os Instrumentais devem ser transportados de forma a impedir qualquer alteração com relação às condições de recebimento do Instrumental Cirúrgico e sua embalagem.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Os Instrumentais Cirúrgicos são fornecidos “Não Estéril”, devendo antes de sua utilização serem esterilizados em autoclave hospitalar de acordo com o procedimento padrão conforme norma aplicável para esterilização em autoclave a vapor NBR ISO 17665-1:2010 Esterilização de produtos para saúde – Vapor Parte 1: Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde. A **Tabela 1** sumariza os parâmetros de esterilização utilizados na autoclave.

Tabela 1.

MÉTODO	CICLO	TEMPERATURA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO
VAPOR	GRAVIDADE	132° - 135° C	10 a 25 min
VAPOR	PRÉ VACUO	132° - 135° C	3 a 4 min

Observação: O Tempo de Exposição deverá ser contado a partir do momento que a temperatura da câmara de esterilização atingir a temperatura especificada.

É de responsabilidade do hospital a validação dos métodos de esterilização utilizada, de acordo com as boas práticas e conhecimentos existentes e também pelas recomendações dos órgãos públicos competentes. Desta forma, recomendamos que todo o processo seja conduzido por pessoal habilitado e com conhecimento do método.

“NÃO UTILIZAR OUTRO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE NÃO SEJA O INDICADO ACIMA”

ADVERTÊNCIA:

Após o uso é necessário que o Instrumental seja lavado, higienizado e em seguida reesterilizado em autoclave.

Esse processo deve ser realizado sempre que o Instrumental for utilizado em uma cirurgia. O reuso do mesmo sem passar por um processo de higienização e reesterilização é expressamente proibido.

11. LIMPEZA

A limpeza consiste num banho em solução de detergente com água aquecida, tão logo os instrumentais deixem de ser utilizados. O detergente deve ser utilizado na concentração e tempo indicados pelo fabricante do detergente. A água não deve ultrapassar a temperatura de 60° C, uma vez que acima desta temperatura ocorre a coagulação de proteínas contidas no sangue, secreções e resíduos tissulares, dificultando assim, o processo de remoção das mesmas.

O principal objetivo desta operação é a remoção de resíduos orgânicos (sangue, pus, gordura...), substâncias químicas (água oxigenada, álcool, éter, iodo...), e outras secreções.

Independentemente do processo de limpeza utilizado, este deve ser realizado o mais precocemente possível, pois quanto mais tempo demorar em ser iniciado, maior será a dificuldade para remover os resíduos nos instrumentais.

Os instrumentais novos, que nunca foram utilizados, devem ser lavados antes de serem conduzidos à esterilização.

12. CONSIDERAÇÕES GERAIS QUANTO AO PROCESSO DE LIMPEZA

- Os Instrumentos devem ser separados por grau de delicadeza e espécie, visando sua preservação além de evitar acidentes. Instrumentos delicados devem ser lavados separadamente. Os leves devem ser acondicionados na cuba de lavagem sobre os pesados.
- Manusear pequenas quantidades de material de cada vez, garantindo um tratamento delicado, evitando pressões desnecessárias.
- Alicates e pinças, ou seja, instrumentos com articulação deverão ser colocados em posição aberta.
- As peças dos instrumentos desmontáveis devem ser submetidas à limpeza isoladamente.

OBSERVAÇÃO

A empresa **TÓRIDE INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA** não se responsabiliza pelos problemas que puderem derivar de mau uso, manejo inadequado, não cumprimento das precauções e imperícia na utilização.

13. Formas de Apresentação do Produto Médico

Os Instrumentais Cirúrgicos são oferecidos ao mercado embalado individualmente em **Embalagem Plástica Transparente**, que é rotulada conforme RDC 185/2001.



Paulo Roberto Celegatti
Responsável Legal
CPF 06195230855



Eng. Dr. Tóride S. Celegatti Filho
Responsável Técnico
CREA 5061019918